

Wichtige Hinweise

Hygiene-Monitoring leicht gemacht

Sterilisations-Check

Die
**HyMo-
Box**

Der Rücktransport – einfach per Post an uns zurück!

Bitte senden Sie die eingesetzten Bioindikatoren sowie die Transportkontrolle an:

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
Mikrobiologie
Schlosssteige 1
74357 Bönningheim

Inhalt:

- 2 Bioindikatoren mit Sporen des Testkeims (*Geobacillus stearothermophilus*)
- 1 Transportkontrolle Bioindikator
- 1 Probenahme-Plan

Haben Sie Fragen:

Schreiben Sie uns unter:
info@hymo-box.de

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.hymo-box.de



Nehmen Sie mit der HyMo-Box Ihr Hygiene-Monitoring selbst in die Hand!

Diese HyMo-Box liefert Ihnen zuverlässige Befunde über die Funktion Ihres Dampfsterilators. Die Prüfung entspricht den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 17665 – damit Ihr Sterilisiergut sicher ist.

Bitte beachten Sie die Hinweise für den Rücktransport auf der Rückseite.

Schritt für Schritt Anleitung

für die HyMo-Box Sterilisations-Check

Ihre Vorteile: Mit Hilfe einer biologischen Prüfung kann die Leistung Ihres Sterilisators und die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in der Umgebung überwachen. Es ist alles inklusive – es kommen keine versteckten Kosten auf Sie zu. Unsere DAKKS Akkreditierung gewährleistet Ihnen höchste Qualität unserer Dienstleistungen.



- HyMo-Box-Umschlag öffnen.
- Bei einer späteren Probenahme können Sie die Tüte mit den Bioindikatoren im Kühlschrank aufbewahren.



- Tag der Durchführung der Prüfungen definieren und dementsprechend Rücktransport für den gleichen Tag planen.
- Bitte planen Sie die Durchführung so, dass die Transportdauer möglichst kurz ist (nicht direkt vor dem Wochenende zurücksenden).



- Die Bioindikatoren aus der Tüte nehmen, den Blister beschriften und in den Dampfsterilisator zum Sterilisationsgut legen.
- Überprüftes Programm und Gerät im Probenahme-Plan notieren.

- Sterilisierte Bioindikatoren, Transportkontrolle & Probenahme-Plan in einen Umschlag legen, zukleben und ans Labor zurücksenden.



- Die Bioindikatoren sind an zwei unterschiedlichen Stellen nahe des Sterilisiergutes zu platzieren.
- Die Transportkontrolle verbleibt unberührt in der Tüte.
- Gerät starten bzw. durchlaufen lassen.
- Nach Öffnen des Gerätes die Bioindikatoren zurück in die Verpackung (Tüte) überführen.

Rücksendeadresse:

**Hohenstein Laboratories
Mikrobiologie
Schlosssteige 1
74357 Bönningheim**